

Helpii-тест, быстрый уреазный тест
(патент РФ 2184781, приоритет от 30.09.1977)

Работа с тестом: Тест поместить на предметное стекло или чашку Петри. Биоптат поместить на поверхность теста (можно накрыть биоптат тестом, поместив его на предметное стекло). Зафиксировать время различного изменения цвета с желтого на синий в зоне контакта с биоптатом.

Если время изменения окраски меньше 3 минут, то тест положительный (НР+), если от 3 до 5 минут, то НР (\pm). Во всех других случаях тест отрицателен (НР-). Контролировать окраску более чем через 5 минут недопустимо.